

サラヤ針捨て BOX 1.4L 取扱説明書

2026年2月 第2版

① フタの取り付けについて

- イ) 写真1のようにフタのツメ4カ所と本体の角4カ所を合わせるようにセットします。
その際、本体はラベルを貼り付けている面を正面にして、フタは仮フタロック用のツメがある方を正面に、組み立ててください。
- ロ) フタのツメを本体の角に1カ所ずつ、はめ込みます。

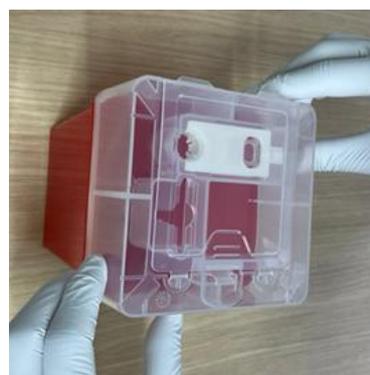
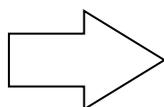


写真1

② フタのはめ込み方法

- イ) 写真2のように、1カ所から順に、はめ込みます。
- ロ) はめ込む際、両手でフタを押さえ、本体の縁を握るよう
力を加えて確実に押し込みます。



写真2

③ はめ込みが終われば、残りのツメも同じ要領で 行ってください。

④ 最後に、全てのツメがしっかりと本体にはまっているか、 ご確認のうえご使用ください。

※ 安全にご使用いただくために針捨てBOXをご使用にならない
際は、仮フタは極力閉めてご使用ください。

※ 廃棄の際は、完全ロック用のツメ（黒丸部分）を折り曲げ、
完全ロック用の溝に差込み、確実に封がされていることをご確認の
うえ、医療廃棄物としてBOXごと廃棄してください（写真3）。



写真3

※耐荷重：1.0kg

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)