


「サラヤ 針捨てBOX 1.4L」スライダーの使い方



ペン型注入器用針を外す際には、BOX奥のスライダーをご使用ください。

ペン型注入器用針

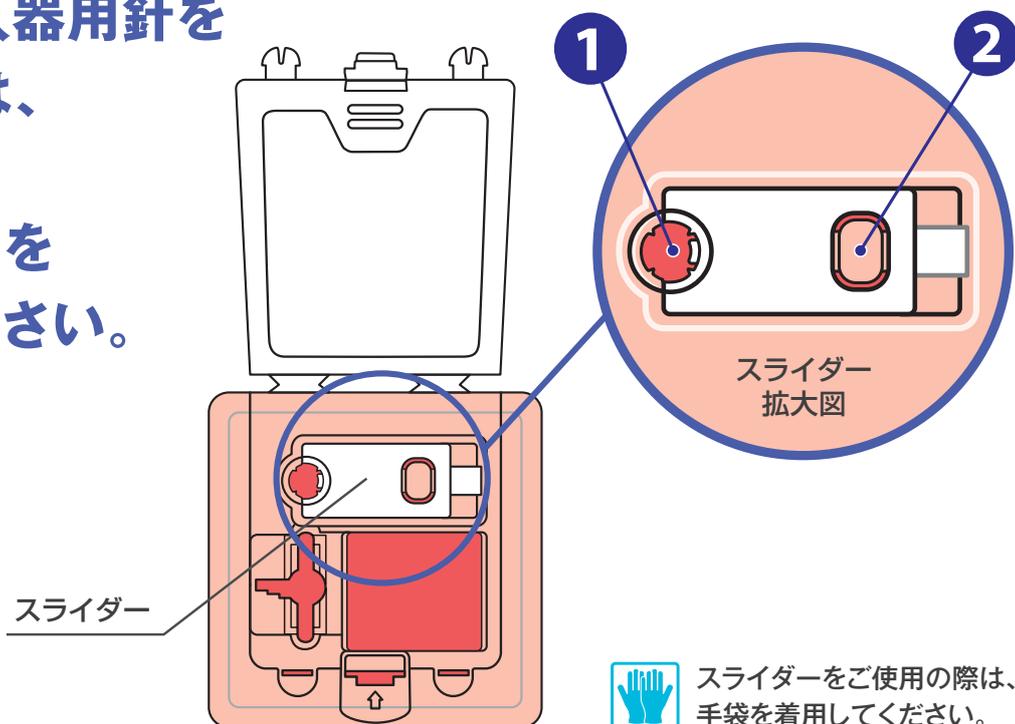


スライダーをご使用の際は、手袋を着用してください。

1 スライダーボタン②を押しながら左に動かし、針の外し口①を閉じます。




2 閉じた針の外し口①にペン型注入器の先端を垂直にまっすぐ差し込みます。

3 ペン型注入器を左回りに回して、注射針を外します。

4 スライダーボタン②を押しながら右に引くと外し口①が開き、針が針捨てBOX内に落ちます。

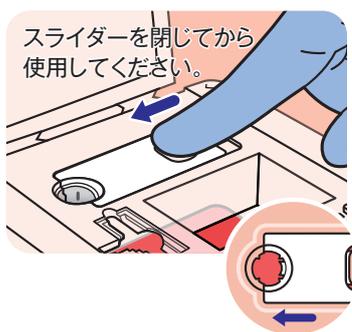


スライダーを開いてから使用してください。

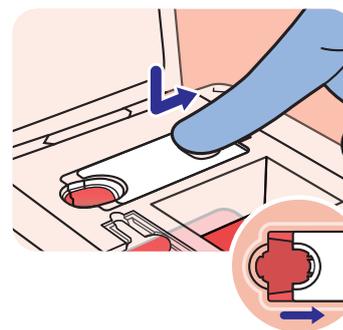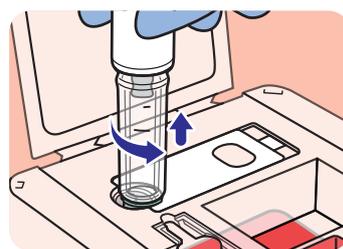
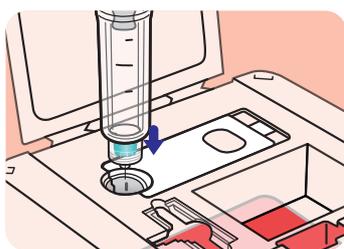


ペンニードル® プラスを使用される場合

スライダー外し口のツメ4点とペンニードル®プラスの凹形状の溝(右記イラスト○印)が合うよう、ペン型注入器本体を挿入してください。

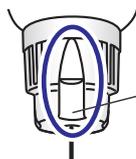

ペンニードル®プラスの凹形状の溝4箇所

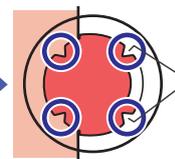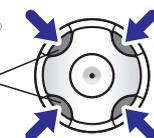

スライダー外し口のツメ4点

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～17:00)

MU/68-0424J-00-M