

# サラヤ針捨て BOX 1L 取扱説明書

2020年1月 第2版

本品は、本体とフタが一体となっているため、針捨て BOX の組み立て方法は「サラヤ針捨て BOX 1.5L」や「サラヤ針捨て BOX 3.2L」と異なります。

① フタを本体側に折りたたみます（写真1、写真2）。

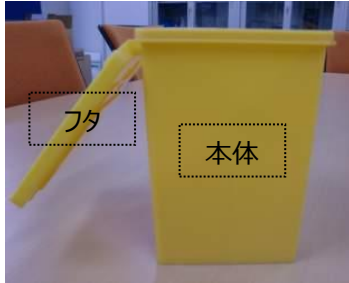


写真1

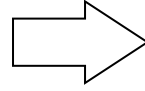


写真2

② フタに付いている2本のツメを、片側ずつしっかりはめ込みます（写真3）。

はめ込む際には、親指でフタを押さえ、残りの指で本体の縁を支え、握るように力を加えてください。

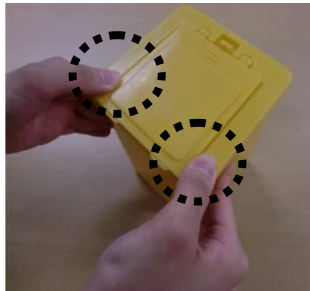


写真3

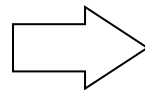


写真4

③ 片側のツメのはめ込みが終われば、もう一方のツメも②と同じ要領ではめ込んでください。

④ 最後に2本のツメがしっかりと本体にはめ込まれているかご確認のうえ、ご使用ください（写真4）。

※ 安全にご使用いただくために針捨て BOX をご使用にならない際は、仮フタは極力閉めてご使用ください（写真5）。

※ 廃棄の際は、完全ロック用のツメ（黒丸部分）を折り曲げ、完全ロック用の溝に差込み、確実に封がされていることをご確認のうえ、医療廃棄物として BOX ごと廃棄してください（写真6）。

※ 耐荷重：0.5kg



写真5

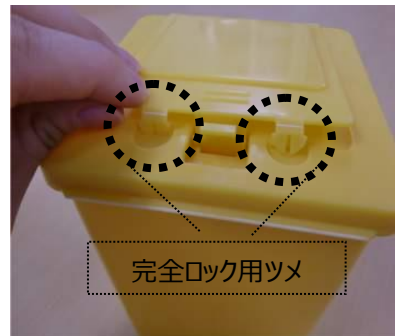


写真6

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

TEL.06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 学術部

TEL.06-4706-3938 (受付時間：平日 9:00~18:00)