
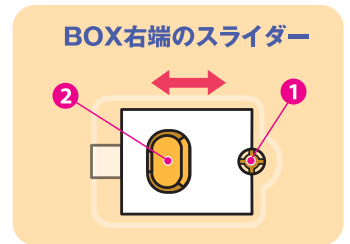


「サラヤ 針捨てBOX 3.2L / 7.6L」スライダーの使い方

ルアーロック式注射針

ロック式の注射針などを外す際には、
針捨てBOX右端のスライダーをご使用ください。

 スライダーをご使用の際は、手袋を着用してください。

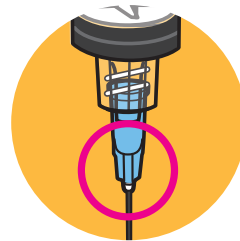

- 1 スライダーボタン②を押しながら右に動かし、注射針外し口①を閉じます。

- 2 閉じた注射針外し口①に注射針を垂直にまっすぐ差し込みます。



- 3 シリンジを左回りに回して、注射針を外します。


- 4 スライダーボタン②を押しながら左に引くと外し口①が開き、針が針捨てBOX内に落ちます。



ペン型注入器用針

ペン型注入器用針を外す際には、
針捨てBOX中央のスライダーをご使用ください。

 スライダーをご使用の際は、手袋を着用してください。

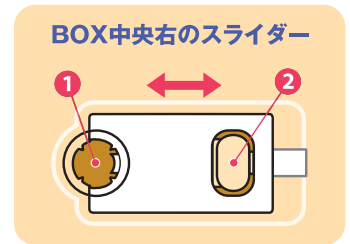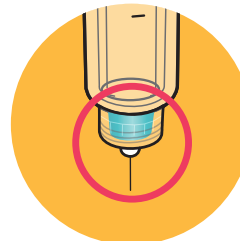


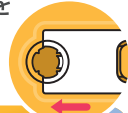- 1 スライダーボタン②を押しながら左に動かし、針の外し口①を閉じます。

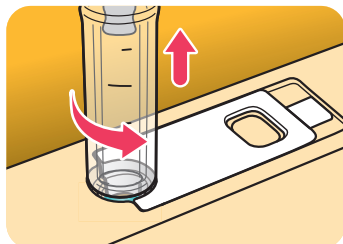- 2 閉じた針の外し口①にペン型注入器の先端を垂直にまっすぐ差し込みます。

- 3 ペン型注入器を左回りに回して、注射針を外します。

- 4 スライダーボタン②を押しながら右に引くと外し口①が開き、針が針捨てBOX内に落ちます。

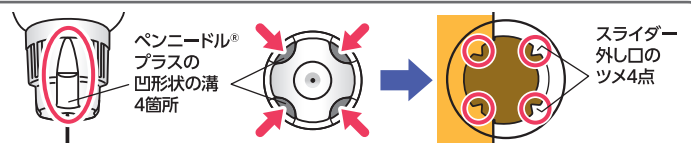
ペンニードル® プラスを使用される場合

スライダー外し口のツメ4点とペンニードル®プラスの凹形状の溝(右記イラスト○印)が合うよう、ペン型注入器本体を挿入してください。



サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>

資料請求・お問い合わせ先

サラヤ株式会社 學術部
TEL.06-4706-3938 (受付時間: 平日 9:00~18:00)